

Somnolis®

Mundschiene gegen Schnarchen Die einfache, wirksame und preiswerte Mundschiene



SOMNOLIS ist eine sehr kompakte Kieferschiene. Sie benötigt keinen Zahnabdruck und kann im Handumdrehen und sehr diskret im Mund getragen werden. SOMNOLIS ist äußerst preiswert und somit ideal um erste Erfahrungen mit einer Kieferschiene zu machen. **Mit SOMNOLIS können Sie sehr einfach und schnell austesten, wie wirksam die Unterkieferprotrusion bei Ihnen ist.** Durch ihre kompakten Maße eignet sie sich außerdem ideal für den Urlaub, beim Camping oder z.Bsp. bei kurzen Krankenhausaufenthalten.

Wirkungsweise

Während des Schlafes schiebt SOMNOLIS den Unterkiefer um einige Millimeter nach vorne. Durch diesen Vorschub (Protrusion) wird hinter der Zunge mehr Raum geschaffen, so dass die ein- und ausgeatmete Luft die Luftwege frei passieren kann.

Indikationen

- Schnarchen
- Leichte Formen von Apnoe: sporadische Anwendung (Reisen), Rücksprache mit Ihrem Arzt erforderlich



made by

OSCI MED
SWISS MEDICAL COMPANY

OSCI MED SA - LA CHAUX-DE-FONDS - SWITZERLAND

Gegenindikationen

- Herausnehmbare Zahnprothese oder schlecht haftende Teilprothese
- Schmerzen im Kiefergelenk
- Zahnfleischartschwund und lockere Zähne
- Wichtig: Bei regelmäßigem Gebrauch (jede Nacht) über einen längeren Zeitraum empfehlen die Anwendung einer individuell angepassten Schiene wie SOMNOFIT oder SOMNOFIT-S

Wirksamkeit

Das Prinzip der Unterkieferprotrusion ist klinisch geprüft und bestätigt. Es ermöglicht das Schnarchen in 80% der Fälle zu verhindern oder zumindest zu reduzieren. Auch bei Schlafapnoe liegt die Reduktion im Mittel bei 55%, kann jedoch beim einzelnen Patienten stark variieren. Bei Schlafapnoe sollte die Wirksamkeit von SOMNOLIS individuell vom Facharzt überprüft werden.

Inhalt

- 1 Kieferschiene gegen Schnarchen
- 4 Bänder zur Einstellung der Protrusion
- 1 Gebrauchsanweisung

CE

PZN 2037800 (DEU)
PZN 3377544 (AUT)

